

FORM FIT™

TAPÓN INTRACANALICULAR

Un **nuevo avance** en el tratamiento del **ojo seco**




TAMAÑO UNIVERSAL

OASIS® 

FORM FIT™

El futuro de la oclusión puntal está aquí.

OASIS presenta la próxima generación en oclusión puntal... el tapón Form Fit™.

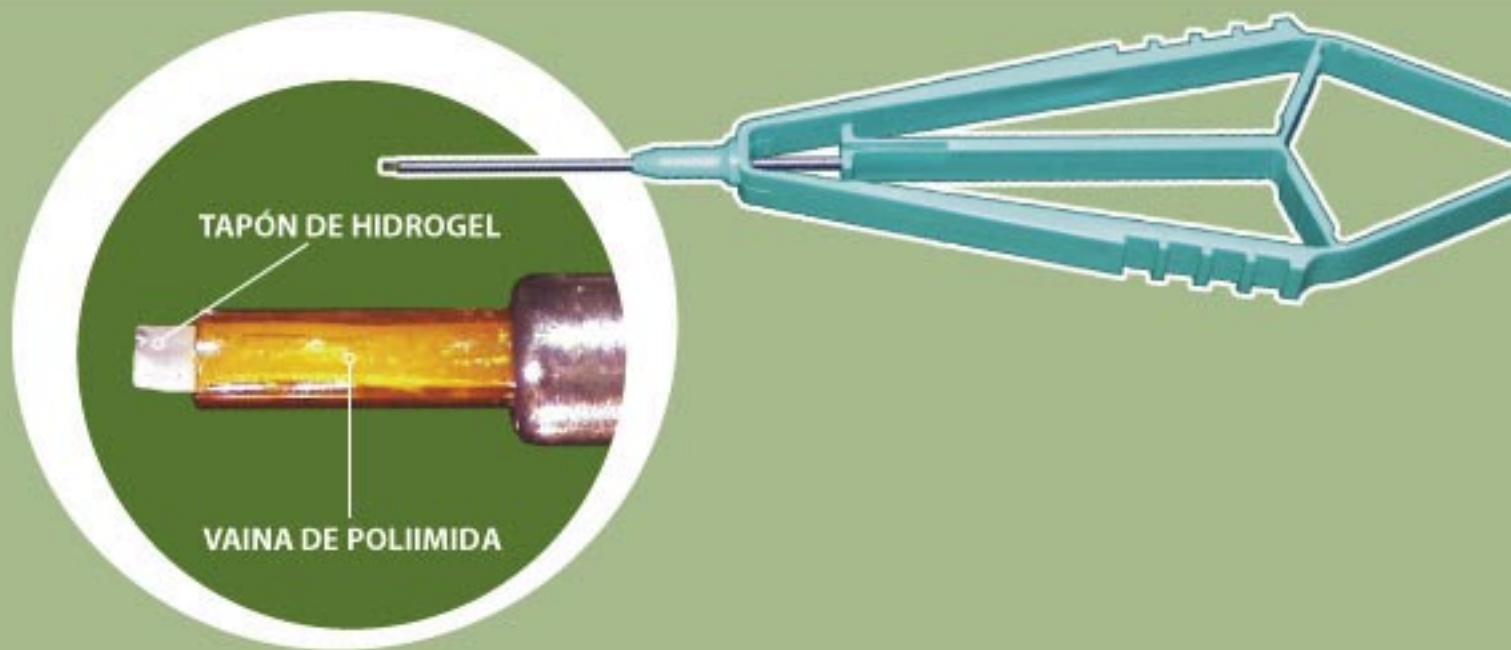

TAMAÑO UNIVERSAL

Form Fit™ es un tapón que realmente se adapta a todos los tamaños. Una vez insertado en el canalículo, Form Fit™ se hidrata en un período de 10 minutos. Al hidratarse, aumenta de tamaño hasta llenar por completo la cavidad canalicular vertical para formar un ajuste perfecto.

CÓMO FUNCIONA

El tapón Form Fit™ está hecho de un material de hidrogel que se expande, quedando un material gelatinoso, blando y maleable cuando hace contacto con la película lagrimal. El tapón tarda aproximadamente 10 minutos en hidratarse por completo.

Form Fit™ se adapta firmemente a la cavidad puntal. No hay necesidad de tapa ni anclaje en el extremo del tapón, lo que aumenta enormemente el bienestar del paciente y disminuye la sensación de cuerpo extraño.

Form Fit™ no empieza a hincharse hasta que hace contacto con la película lagrimal, reduciendo así el potencial de pérdida del producto. Form Fit™ está hecho de un material de hidrogel que es seguro y biocompatible.

INSERCIÓN DEL FORM FIT™

El tapón Form Fit™ se inserta fácilmente en el canalículo. Form Fit™ viene previamente cargado en un insertador fácil de usar. Se inserta el vaina de polimida en el punto lagrimal y se comprime el mango del insertador para que salga el tapón de hidrogel.

En su estado seco, el material es una varilla rígida que mide 0,3 mm de diámetro por 3,0 mm de largo. El tapón Form Fit™ se desliza fácilmente dentro de la cavidad puntal. No se requiere hacer mediciones. El Form Fit™ se hincha entonces para formar un material gelatinoso.



INSERCIÓN



INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA INSERCIÓN



10 MINUTOS DESPUÉS DE LA INSERCIÓN



EXTRACCIÓN DEL FORM FIT™

Para retirar el tapón Form Fit™, simplemente aplique solución salina a través de la abertura puntal y el material gelatinoso se expulsará por la cavidad nasal.

CONVENIENCIA

- El tapón Form Fit™ no necesita almacenamiento especial.
- El inventario de tapones se reduce porque ya no se necesitan diversos tamaños.
- Se elimina la necesidad de mediciones, lo cual agiliza los exámenes.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Se hidrata en un lapso de 10 minutos
- Se expande para adaptarse suavemente a la cavidad puntal de la persona
- Se elimina el tapón con tapa de silicona
- Tapón de largo plazo que se extrae fácilmente irrigando el conducto lagrimal
- Biocompatible
- No hay sensación de cuerpo extraño
- Para mayor conveniencia, previamente cargado en un insertador sencillo de usar
- Se elimina la medición del punto lagrimal



OASIS ofrece una solución completa para la oclusión puntal con la línea **SOFT PLUG®** de **tapones para punto lagrimal**.



TAPONES INTRACANALICULARES DE COLÁGENO

Los tapones de colágeno tienen un acabado suave exclusivo que simplifica su inserción. Los tapones de colágeno son ideales para oclusión de corto plazo, diagnóstica y postquirúrgica. Tamaños de diámetro: 0,2 mm, 0,3 mm y 0,4 mm



TAPONES DE LARGA DURACIÓN

Los tapones absorbibles de larga duración están diseñados para dar comodidad al paciente hasta por 3 meses. Este tapón de larga duración es eficaz y económico para síntomas transitorios de ojo seco después de la cirugía.

Tamaños de diámetro: 0,3 mm, 0,4 mm y 0,5 mm



TAPONES DE SILICONA PARA PUNTO LAGRIMAL

Los tapones de silicona SOFT PLUG® presentan una silicona más blanda y flexible que optimiza la comodidad del paciente.

Tamaños: micro (0,4 mm), mini (0,5 mm), extrapequeño (0,6 mm), pequeño (0,7 mm) y mediano (0,8 mm)

Para hacer pedidos llame al 909.305.5400 o al 800.528.9786

Fax las 24 horas 909.305.9987 ó 800.631.7210

www.OasisMedical.com

514 S. Vermont Avenue
Glendora, CA 91741 EE. UU.

OASIS® 
CM009S 03/05